

Dentalmöbel Standard

Dentalmöbel mit Häubi-Technikklappe



Belmont (Schweiz), Häubi AG, Generalvertretung seit 1977

Behandlungsstuhl Clesta II

BODENANSCHLUSS

- EA: Elektroanschluss M20, 1x 230 V 13A\*
- ES: Steuerleitung Absauganlage M20, Kabel U72 1x4x0.8
- D: Druckluft 1/2" Innen Gewinde (Absperrhahnen angeliefert durch Häubi)
- S: Saugrohr PE-Geberit DN 50, D: Ø 50mm, di: Ø 44mm, Elektromuffen verschweisst \*
- Abschluss mit Steckmuffe di: 40mm**
- W: Kaltwasseranschluss 1/2" Innen Gewinde, (Absperrhahnen angeliefert durch Häubi)
- R: Ruffleitung M20, Kabel U72 1x4x0.8 (Optional in Absprache)
- L: Leerrohr M60, für EDV/DVI/HDMI (Optional in Absprache)

Hinweis: Anordnung frei wählbar, je nach Leitungsführung  
 \* Stumpfschweissen wegen Platzmangel nur in Absprache mit Bauleitung  
**Hinweis: Keine Leitungsführung unterhalb des Stuhles**

**Häubi**

Häubi AG  
 Werkstrasse 29  
 CH-3250 Lyss  
 T. 032 555 30 00


info@haeubi.ch  
 www.haeubi.ch  
 belmont-dental.ch

-----	
Objektnummer	Produauftrag
-----	
-----	
-----	
-----	
-----	
-----	
Objektbezeichnung/Kunde	

Mst:	
Erstellt:	22.04.2017
Gedruckt:	10.06.2019
Gr:	A3 (297 x 420 mm)
Gez:	----
PlanNr:	-----01
Seite:	1/1



Absperrhahnen zu Pos. D und W

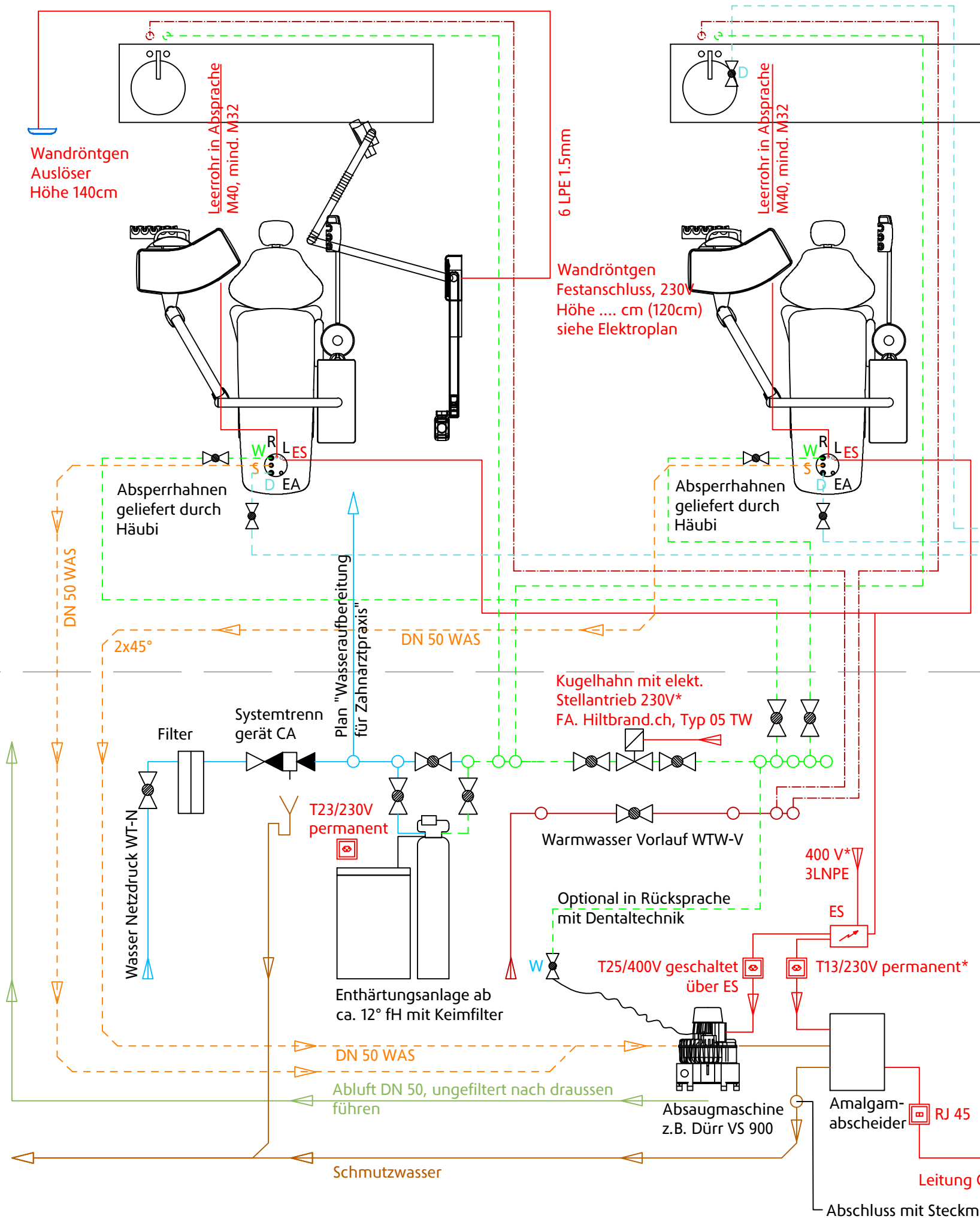

**INSTALLATIONS SCHEMA DENTALTECHNIK**

**NASSABSAUGUNG**

**Sanitär - und Elektro Installationen**

\* Zentral geschaltet in Praxis über Dreh- oder Schliesszylinder

WT-R Crst / GF I-Fit  
 WTW-VCrst / GF I-Fit  
 WAS PE / PE-Silent mit 2x45°

RJ 45 Anzeigemodul

Leitung CAT5.e zu Anzeigemodul in, z.B. in Steri oder Empfang (Standort in Absprache)

Abschluss mit Steckmuffe di: 40mm

Ausführungsbeschreibung

Z:\Haeubi\T2\_Dental Installationsanleitung\AutoCAD\Installationschema Belmont.dwg



Belmont (Schweiz), Häubi AG, Generalvertretung seit 1977  
 Behandlungsstuhl Clesta II

**BODENANSCHLUSS**

- A: Ablauf PE-Geberit DN 50, Syphoniert, D: Ø 50mm, di: Ø 44mm, Abschluss mit Steckmuffe
- EA: Elektroanschluss M20, 1x 230 V 13A,
- ES: Steuerleitung Absauganlage M20, Kabel U72 1x4x0.8
- D: Druckluft 1/2" Innen Gewinde (Absperrhahnen angeliefert durch Häubi)
- S: Saugrohr PE-Geberit DN 50, D: Ø 50mm, di: Ø 44mm, **Abschluss mit Steckmuffe** di: 40mm
- W: Kaltwasseranschluss 1/2" Innen Gewinde, (Absperrhahnen angeliefert durch Häubi)
- R: Ruffleitung M20, Kabel U72 1x4x0.8 (Optional in Absprache)
- L: Leerrohr M60, für EDV/DVI/HDMI (Optional in Absprache)

Hinweis: Anordnung frei wählbar, je nach Leitungsführung  
 Hinweis: Keine Leitungsführung unterhalb des Stuhles



Häubi AG  
 Werkstrasse 29  
 CH-3250 Lyss  
 T. 032 555 30 00

info@haeubi.ch  
 www.haeubi.ch  
 belmont-dental.ch


-----	-----
Objektnummer	Produauftrag

-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
Objektbezeichnung/Kunde	-----

Mst:	
Erstellt:	22.04.2017
Gedruckt:	10.06.2019
Gr:	A3 (297 x 420 mm)
Gez:	----
PlanNr:	-----01
Seite:	1/1



Absperrhahnen zu Pos. D und W

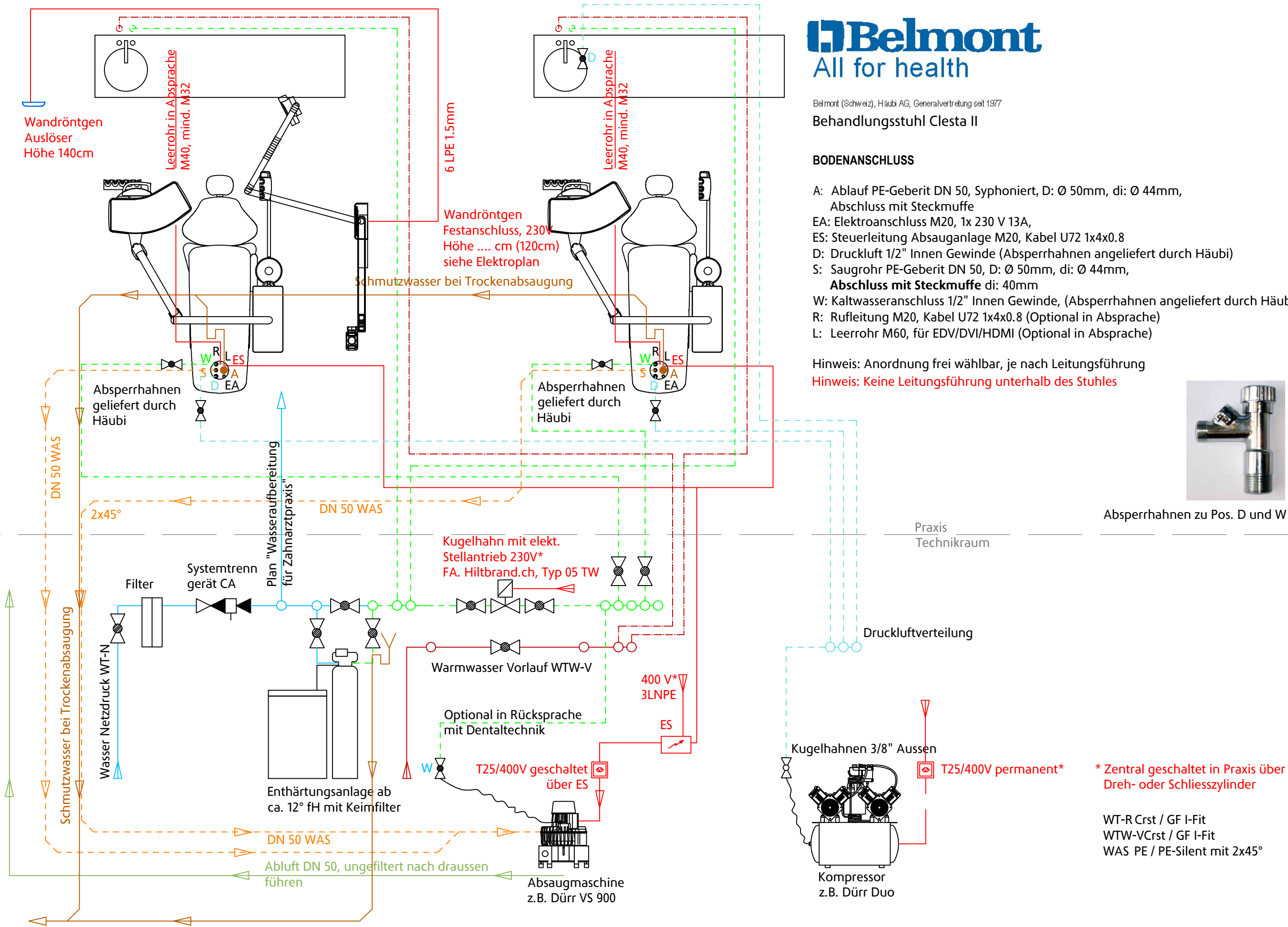

**INSTALLATIONS SCHEMA DENTALTECHNIK**

**TROCKEN-ABSAUGUNG**

**Sanitär - und Elektro Installationen**

\* Zentral geschaltet in Praxis über Dreh- oder Schliesszylinder

- WT-R Crst / GF I-Fit
- WTW-VCrst / GF I-Fit
- WAS PE / PE-Silent mit 2x45°